

Οξυγονοθεραπεία και εξαρτήματα. Υγραντήρας 250ml με Βαλβίδα Ασφαλείας 0,41 bar Humidifier 250ml with Safety Valve 6PSI

REF 0806204



Θερμοκρασία Αποθήκευσης: 15°C – 25°C
Επιτρεπόμενη υγρασία αποθήκευσης: <85%

Instruction of use/ΟδηγίεςΧρήσης

- EN** - 1. Fill humidifier jar to the maximum fill line with water. Do not allow water to fall below the minimum fill line.
2. Attach the humidifier lid to the jar.
3. Attach the wing nut on the humidifier to oxygen source.
4. Test the humidifier for leaks by occluding the humidifier outlet. The safety valve should activate. If the valve is not activated or if any appreciable leakage occur, check to make sure the humidifier lid is securely attached to the jar and the fitting to oxygen source is securely tightened.
5. Connect oxygen tubing (not included) to the nipple on the humidifier lid, be sure all connections are secure.
6. Turn on the oxygen source to the prescribed LPM.
7. The safety valve will alarm if there is a kink or blockage in the delivery system.
- GR** - 1. Γεμίστε τον υγραντήρα στη μέγιστη γραμμή πλήρωσης με νερό. Μην αφήνετε το νερό να πέσει κάτω από την ελάχιστη γραμμή πλήρωσης.
2. Συνδέστε το καπάκι του υγραντήρα στο δοχείο.
3. Συνδέστε το παξιμάδι του υγραντήρα στην πηγή οξυγόνου.
4. Ελέγξτε ότι ο υγραντήρας έχει διαρροές αποκλειώντας την έξοδο του υγραντήρα. Η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να ενεργοποιηθεί. Εάν η βαλβίδα δεν είναι ενεργοποιημένη ή εάν προκύψει αισθητή διαρροή, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του υγραντήρα είναι καλά στερεωμένο και ότι η σύνδεση με την πηγή οξυγόνου είναι σφικτά σφιγμένη.
5. Συνδέστε τη σωλήνωση οξυγόνου (δεν περιλαμβάνεται) στο ακροφύσιο στο κάλυμμα του υγραντήρα, βεβαιωθείτε όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς.
6. Ενεργοποιήστε την πηγή οξυγόνου στα καθορισμένα λίτρα ανά λεπτό.
7. Η βαλβίδα ασφαλείας θα ειδοποιηθεί αν υπάρχει βλάβη ή μπλοκάρισμα στο σύστημα παράδοσης.

Caution/ Προσοχή

- EN** - The humidifier is equipped with a safety valve. When the safety valve sounds, check the downstream supply tubing and the therapy device, remove any obstruction before resuming use.
- Intended for use by qualified personnel trained.
- The item is for personal use only otherwise may cause cross infection and reduce product reliability and functionality.
- The water must be changed every 8 hours of use. Is recommended to use distilled water.
- GR** - Ο υγραντήρας είναι εξοπλισμένος με βαλβίδα ασφαλείας. Όταν η βαλβίδα ασφαλείας ηχεί, ελέγξτε τη σωλήνωση τροφοδοσίας και τη συσκευή θεραπείας, αφαιρέστε τυχόν εμπόδια πριν συνεχίσετε τη χρήση.
- Προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό
- Το προϊόν είναι για προσωπική χρήση, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει μόλυνση και να μειώσει την αξιοπιστία και λειτουργικότητα του προϊόντος.
- Το νερό πρέπει να αλλάζεται κάθε 8 ώρες χρήσης. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε αποιονισμένο νερό.

QTY 1 piece

LOT



EU Representative
mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71,
D-30855 Langenhagen
Tel: +49 511 3908 9530
Fax: +49 511 3908 9539
http://www.mdi-europa.com

Distributed by:
MOBIAK S.A
Kathiana Akrotiri,
Chania - Crete, Greece

Tel: +30 28210 63222
www.mobiakcare.com

Manufactured by
HSINER Co., Ltd.
312, Jhongsan Rd., Shengang Dist,
Taichung City 429, Taiwan
Tel: 886-4-25152480
Fax: 886-4-25152482
Email: sales@hsiner.com
Web Site: <http://www.hsiner.com>



CE
2460

