


Οδηγίες Χρήσης Μονόσπαστου Κρεβατιού

Single Crank Manual Folding Bed User Manual


Το κρεβάτι αποτελείται από τα παρακάτω μέρη, όπως φαίνονται στην Εικόνα # 1
Single crank manual folding bed installation parts as Figure #1.

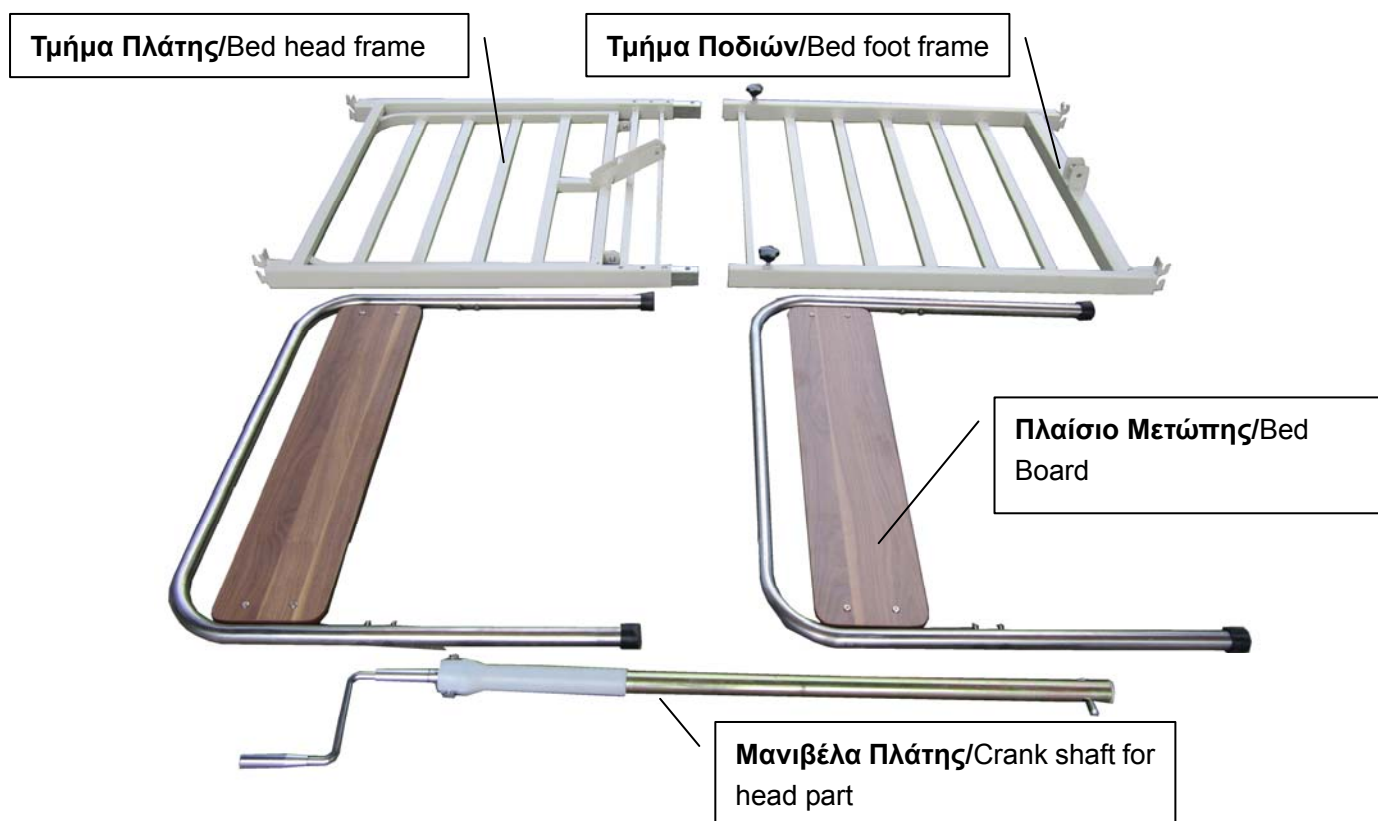

Εικ./Figure #1

1. Τοποθέτηση του μπλοκ σύνδεσης του πλαισίου / Installing the bed frame junction block


Βγάλτε τα M10X20 μπουλόνια από τον ορθογώνιο σωλήνα 50x30 του προσκέφαλου, τραβήξτε το πλαίσιο του κρεβατιού, ταιριάξτε με την πρώτη τρύπα για βίδα και στερεώστε την βίδα M10X20 με τις $\phi 10$ ροδέλες. Μην σφίγγετε υπερβολικά τη βίδα, βεβαιωθείτε ότι το μπλοκ σύνδεσης του πλαισίου κρεβάτι μπορεί να κινηθεί. Δείτε την Εικόνα # 2/Take out M10X20 bolt from the 50X30 rectangular tube of bed head frame, pull up the bed frame junction block, matching the first bolt hole and fasten by M10X20 bolt with $\phi 10$ spring washer & $\phi 10$ flat washer. Do not over tighten the bolt, make sure the bed frame junction block still can move. See Figure #2.

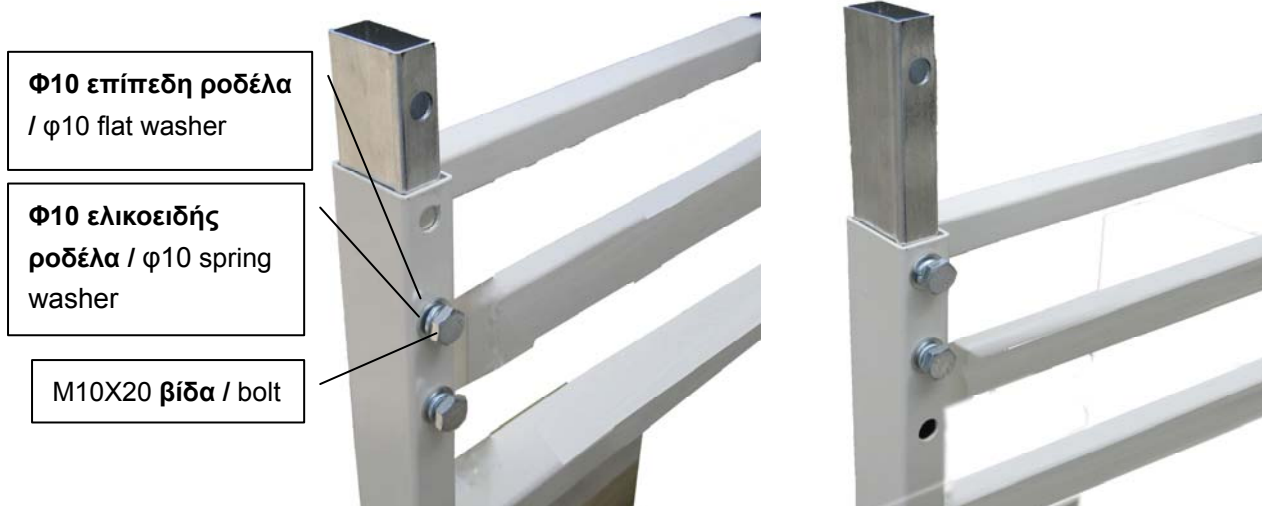

Εικ./Figure #2

2 . Ενώνοντας τον σομιέ / Connecting the middle frame

Τοποθετήστε τον ορθογώνιο 50x30 σωλήνα του πλαισίου για τα πόδια του κρεβατιού μέσα στο συνδετικό μέρος του πλαισίου για το κεφάλι και σφίξτε τη λαβή. Δείτε την Εικόνα # 3./ Insert the 50X30 rectangular tube at bed foot frame into the connecting part at bed head frame and tighten the handle. See Figure #3.

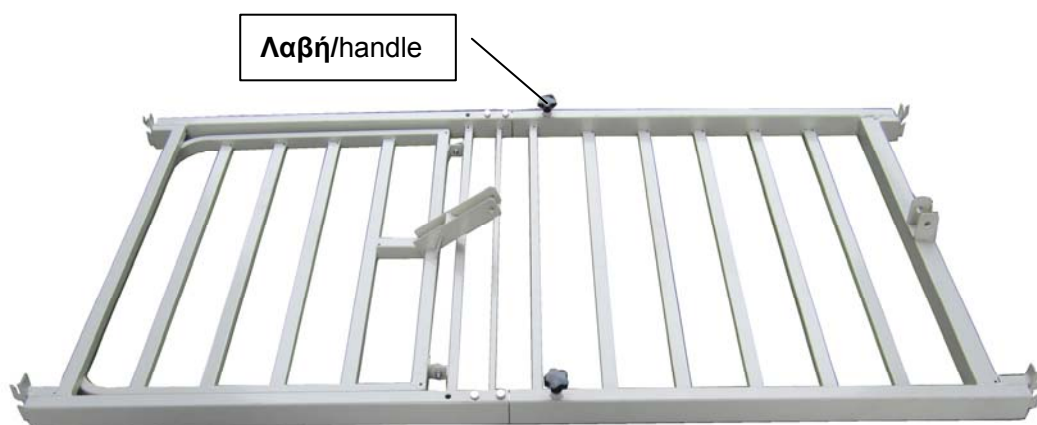

Εικ./Figure #3

3 . Τοποθετώντας τη μανιβέλα / Installing the crank shaft

Ταιριάξτε την τρύπα για M10 βίδα που βρίσκεται στο στροφαλοφόρο άξονα με την αντίστοιχη τρύπα στο πλαίσιο του κρεβατιού, σφίξτε τη βίδα M10X16 με ροδέλα ελικοειδή φ10. Ταιριάξτε την ελλειπτική τρύπα του στροφαλοφόρου άξονα με την αντίστοιχη τρύπα της βάσης, σφίξτε τα φ10 × 50 πριτσίνια με δεματικό και τέλος περάστε μέσα από την φ3 τρύπα,. Δείτε την εικόνα # 4 / Match the M10 screw hole at crank shaft to crank shaft base hole at bed frame, tighten the M10X16 bolt with φ10 spring washer. Match the elliptical hole at crank shaft to crank shaft base hole, tighten the φ10×50 rivet with rubber washer and finally go through φ3 hole at the rivet with tubular latch. See Figure #4.



Εικ./Figure #4

Μανιβέλα Πλάτης / Crank shaft for head part

4 . Σύνδεση Μετωπών με τον σωμαί / Connecting the bed boards with bed frame

Κρατήστε όρθιο με το ένα χέρι την Μετώπη και με το άλλο ανασηκώστε τον σωμαί, τοποθετήστε της εγκοπές του σωμαί στις προεξοχές στήριξης όπως γαίνεται στην Εικ.5./One hand holding up the bed board, the other hand lifting the bed frame, insert the installation bolt to the slot as Figure #5.




Εικ./Figure #5

5 . Λειτουργώντας τη μανιβέλα /Operation manual for crank shaft

Χρησιμοποιήστε την μανιβέλα για την κίνηση της πλάτης πάνω και κάτω. Για να χρησιμοποιήσετε την μανιβέλα, τραβήξτε την (βλέπε Εικ. # 6), μέχρι να ακουστεί ένα "κλικ" και στη συνέχεια περιστρέψτε την για κίνηση πάνω και κάτω. Δεξιόστροφη περιστροφή είναι για κίνηση της πλάτης προς τα πάνω και αριστερόστροφη περιστροφή είναι για κίνηση προς τα κάτω. Δείτε την εικόνα # 7. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη μανιβέλα, τραβήξτε προς τα έξω τη λαβή της μανιβέλας και στη συνέχεια σπρώξτε προς τα κάτω για να διπλώσετε την λαβή προς τα κάτω. Δείτε την εικόνα # 8. Όταν δεν χρησιμοποιείται η μανιβέλα θα

πρέπει να δείχνει όπως την εικόνα # 6./ Use crank shaft to achieve backrest up and down. When use crank, pull up the crank(see Figure #6) until a “click” and then swivel the crank for up and down. Clockwise rotation is for backrest up and anticlockwise rotation is for backrest down. See Figure #7. When not use crank, pull out the crank sleeving and then push down to make crank down, conceal the crank. See Figure #8. Concealing situation see Figure #6.

⚠ Προσοχή/Attention : Μην συνεχίζετε να γυρίζετε την μανιβέλα όταν η πλάτη του κρεβατιού έχει φτάσει στο υψηλότερο ή στο χαμηλότερο σημείο. Άσκοπη χρήση της μανιβέλας ενδέχεται αν δημιουργήσει βλάβη στον μηχανισμό ανύψωσης & δυσλειτουργία. / Do not continue to turn the crank when the back of the bed has reached the highest or lowest point. Unnecessary use of the crank may damage the hoist mechanism and malfunction.

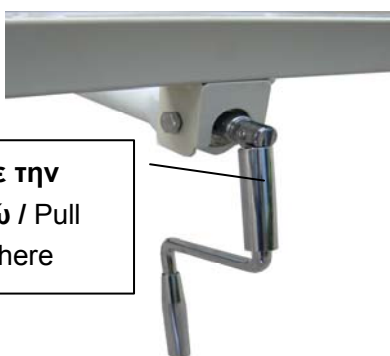


**Τραβήξτε την
λαβή εδώ / Pull
up crank here**

Εικ./Figure #6



Εικ./Figure #7

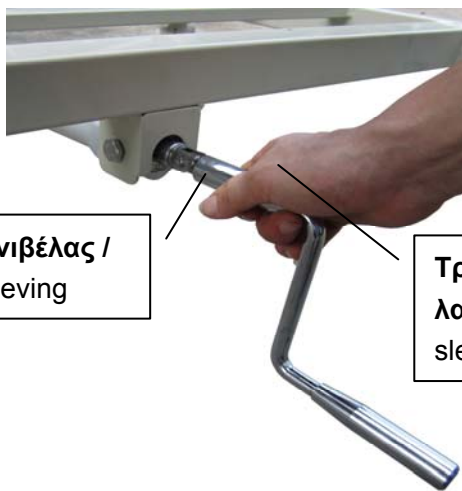

**Λαβή μανιβέλας /
Crank sleeving**

**Τραβήξτε έξω την
λαβή / Pull out crank
sleeving**

Εικ./Figure #8




**Πιέστε προς τα
κάτω / Pushing down**

6. Τροχοί & Κάγκελα ενδέχεται να είναι προαιρετικά / Castors and European side rails can be optional.

6.1 Τοποθετώντας τους τροχούς / Installing castor

Εισάγετε το στέλεχος του τροχού στο σωλήνα και ταιριάξτε το με την οπή της βίδας, σφίξτε τη βίδα με την ελικοειδή ροδέλα. Πατήστε το μεγάλο κουμπί

φρένων για να επιτευχθεί το κλείδωμα και το μικρό κουμπί φρένων για το ξεκλείδωμα. Δείτε την εικόνα # 9 / Insert castor stem into bed board tubular tube and match the screw hole, tighten the bolt with spring ring. Step brake paddle to achieve locking and step unlocking paddle to achieve unlocking. See Figure #9.

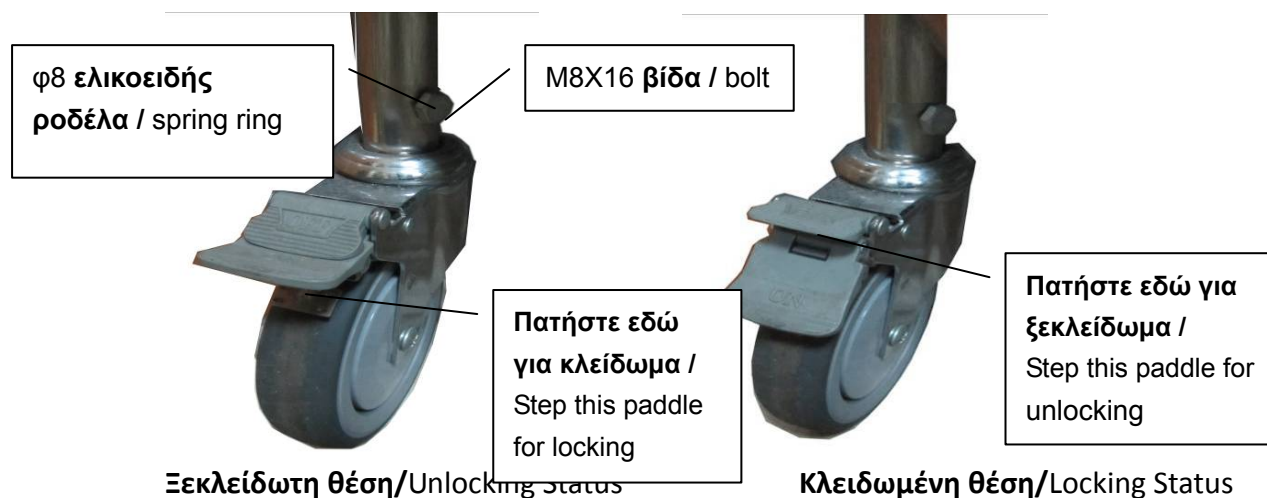


Εικ./Figure #9

6.2 Τοποθετώντας τα κάγκελα / Installing side rails

6.2.1 Έχοντας το πλαίσιο του κρεβατιού σε οριζόντια θέση, τοποθετήστε τις βάσεις στον 50x30 ορθογώνιο σωλήνα του πλαισίου. Δείτε το σχήμα # 10. Σφίξτε το παξιμάδι με το μπουλόνι, ενισχύστε με την φ8 ροδέλα. Δείτε την εικόνα # 10A και 10B #. / At ideal position of the bed frame, insert the side rail installing base into 50x30 rectangular tube at bed frame. See Figure #10. Tighten the nut with bolt, reinforce sleeve and φ8 flat washer. See Figure #10A and #10B



Εικ./Figure #10

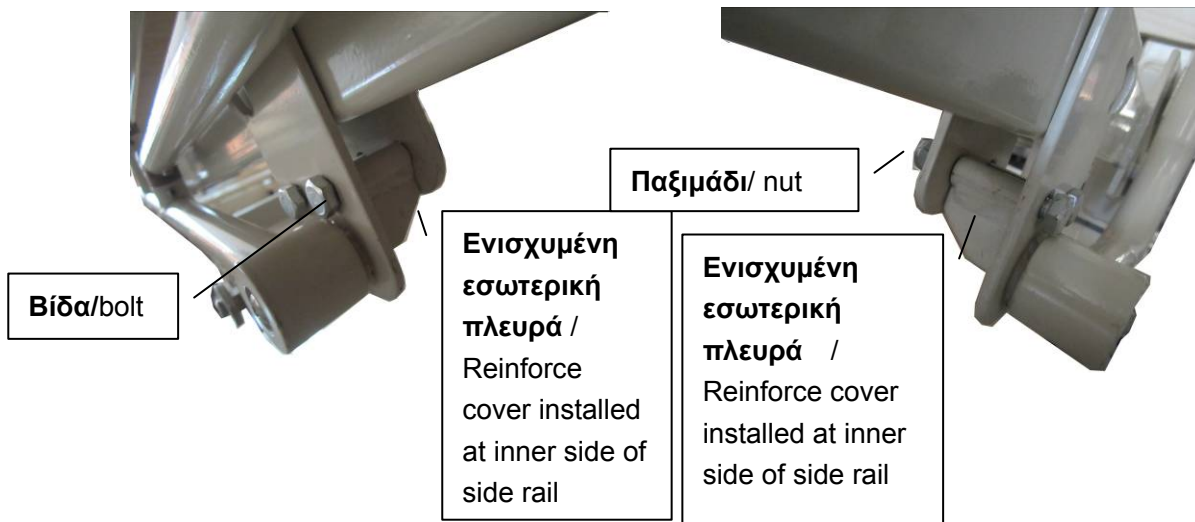


Εικ./Figure #10A

Εικ./Figure #10B

6.2.2 Επαναλάβετε την παραπάνω μέθοδο (βήμα 6.2.1) για να τοποθετήσετε το άλλο κάγκελο. / Repeat the above installation method as 6.2.1 to install the other side rail.

6.2.3 Τραβήξτε προς τα έξω το κουμπί της λαβής και τραβήξτε προς τα κάτω το κάγκελο, ώστε να συμπτυχτεί προς τα κάτω. Δείτε την εικόνα # 11. Τραβήξτε προς τα πάνω το κάγκελο μέχρι να ακουστεί ένα "κλικ" για να κλειδώσει και να μείνει πάνω. Δείτε το σχήμα # 11. / Pull out the handle button and pull down the side rail sideling to make side rail down. See Figure #11. Pull up the side rail until a "click" to make side rail get rigid and up. See Figure #11.

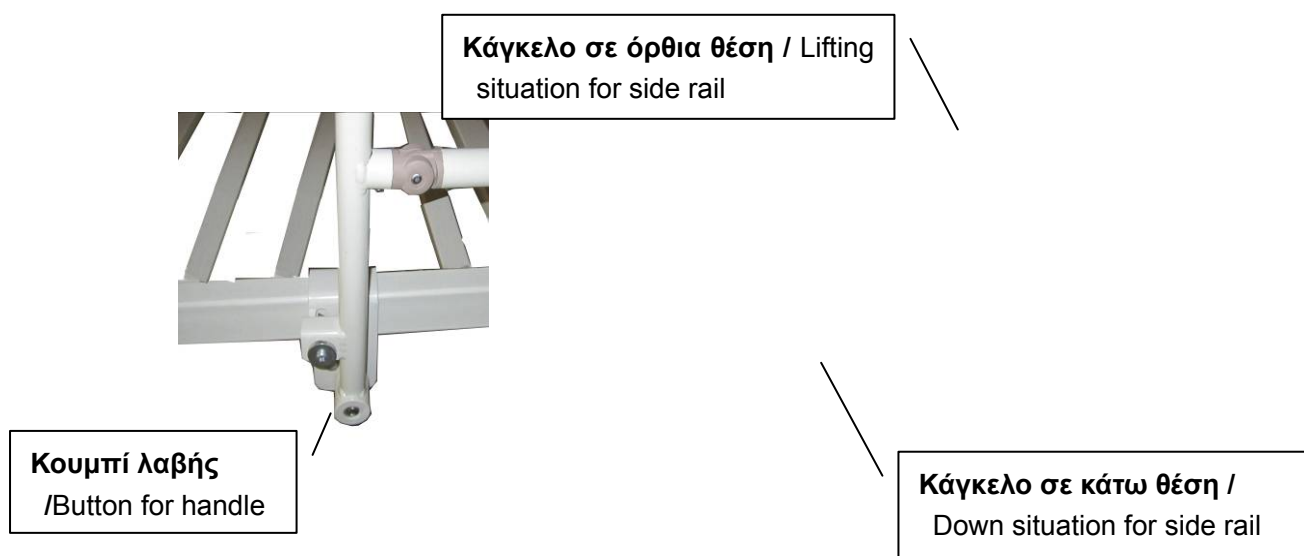



Εικ./Figure #11

7. **Εγγύηση/Warranty:** Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & όχι βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση/συντήρηση του προϊόντος./ The product has a warranty period of one (1) year. The warranty covers factory defects and not damages from misuse/maintenance product.

Φόρμα Εγγύησης/Warranty Claim Form

Στοιχεία Αγοραστή/Buyers Data

Όνοματεπώνυμο/Name :

Ημ/νία Αγοράς/Date of buy:

Τηλέφωνο/Phone:

Στοιχεία Καταστήματος/Resellers Data

Επωνυμία/Name :

Διεύθυνση/Address :

Τηλέφωνο/Phone:

Σφραγίδα καταστήματος /Reseller Stamp

MOBIAK A.E

Μ.Μπότσαρη 96-98, Χανιά-Κρήτης

MOBIAK S.A

Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΙ 96-98 Chania-Crete, Greece

+30-28210-63222

www.mobiakcare.gr

