

▲
Tear Here / Άνοιγμα εδώ

Well Lead®



code: 0803111/ R01B06011F

**Ρινικά Γυαλιά Οξυγονοθεραπείας / Curved Prong
Oxygen Nasal Cannula / Curved Prong Adult**

Instructions of use / Οδηγίες Χρήσης 2.1m Length

EN 1. Attach the oxygen supply to the oxygen source.
2. Set the oxygen to the prescribed flow.
3. Insert the nasal tips into the nostrils with the two plastic. Tube over the Ears and under the chin.

GR 1. Συνδέστε τη σωλήνωση παροχής οξυγόνου στην πηγή οξυγόνου.
2. Ρυθμίστε το οξυγόνο στην προκαθορισμένη ροή.
3. Εισάγετε τις ρινικές άκρες στα ρουθούνια με τους δύο πλαστικούς σωλήνες πάνω από τα αυτιά και κάτω από το πηγούνι.

Note / Σημείωση

EN To fit smaller patients use not intended for reprocessing.
GR Σε περίπτωση χρήσης από ασθενείς μικρότερου μεγέθους, δεν προτείνεται επανεπεξεργασία.

Caution / Προσοχή

EN - For single use. Discard after use.
- Do not store in direct sunlight, at extreme temperatures or in high humidity.
Store in dry conditions.
- Do not use if package is open or damaged.

GR - Για ατομική χρήση μόνο. Απορρίψτε μετά τη χρήση.
- Μην το αποθηκεύετε σε άμεσο ηλιακό φως, σε ακραίες θερμοκρασίες ή σε υψηλή υγρασία.
- Αποθηκεύεται σε ξηρές συνθήκες. Μην χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι ανοικτή ή κατεστραμμένη.

DISTROBUTOR:

MOBIAK
96-98 str. M. Mpotsari
Chania - Crete - Greece
Tel: +30 28210 63222
Web Site: www.mobiakcare.gr

Manufacturer:
Well Lead Medical Co.,Ltd.
C-4 Jinhui Industrial Estate, Hualong
511434 Panyu, Guangzhou
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC-Representative:
Shanghai International Holding
Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80
20537 Hamburg
GERMANY

LOT :

⏳ :

⏳ :

1 PC

Well Lead®

code: 0803111 / R01B06011F

**Ρινικά Γαυιά Οξυγονοθεραπείας / Curved Prong
Oxygen Nasal Cannula / Curved Prong Adult**

DISTROBUTOR:

MOBIAK
MEDICAL • GASES • FIREPROTECTING 001 077
96-98 str. M. Mpotsari
Chania - Crete - Greece

Tel: +30 28210 63222
Web Site: www.mobiakcare.gr

Manufacturer:
Well Lead Medical Co., Ltd.
C-4 Jinhui Industrial Estate, Hualong
511434 Panyu, Guangzhou
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC-Representative:
Shanghai International Holding
Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80
20537 Hamburg
GERMANY



**Ref: 0803111
R01B06011F**

LOT

Type: Oxygen Nasal Canoula
Curved Prong



Size: Adult



QTY 100 pcs

G.W: 10.5 Kg

(LxWxH): 48x36x29cm

N.W: 9.5 Kg

