

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ/ Commode Chairs User Manual
0806620, 0809155, 0809156, 0808524



Οι τουαλέτες παραδίδονται συναρμολογημένες & έτοιμες προς χρήση./ Commode Chairs are delivered assembled & ready for use.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ/INSTRUCTIONS FOR USE

Οι τουαλέτες μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με περιορισμένη κινητικότητα εντός σπιτιού./ The Commodes can be used by people with limited mobility inside the house.

Οι τουαλέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας ή ως βοήθημα για την λεκάνη της τουαλέτας (Εικ.1)./ Commode Chairs can be used directly or as an aid to the toilet bowl (Fig.1).



Εικ./Fig.1

MOBIAK A.E
Μ.Μπότσαρη 96-98, Χανιά-Κρήτης

MOBIAK S.A
Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΙ 96-98 Chania-Crete, Greece
+30-28210-63222

www.mobiakcare.gr Email: mobiakcaresales@mobiak.gr



Πριν χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι/ Before using the Commode Chair make sure that:

- **Βρίσκεται σε πλήρη έκταση & έχει ασφαλίσει σε αυτή τη θέση./ Is in full extension and is locked in this position .**
- **Οι ρόδες (εφόσον διαθέτει) είναι καλά στερεωμένες./ The wheels (if available) are firmly fixed.**
- **Το κάθισμα εφαρμόζει σωστά & έχει ασφαλίσει σε αυτή τη θέση./ The seat is correctly placed and secure in this position.**
- **Το δοχείο είναι σωστά τοποθετημένο στην κατάλληλη υποδοχή./ The tank is correctly placed into the appropriate slot.**
- **Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό./ There are no cracks or fractures in the frame.**

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την τουαλέτα μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα./ If trouble occurs in any of the above DO NOT use the commode chair until the problem is resolved .

ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ FURTHER INSTRUCTIONS

- **Όταν κάθεστε ή σηκώνεστε πρέπει να πιέζετε τις λαβές προς τα κάτω, ώστε η τουαλέτα να μένει ακίνητη και να μη γλιστρά./ When sitting or standing up from the commode chair push the handles down, securing that it will stand still and not slip.**
- **Όταν σηκώνεστε πρέπει να στηρίζεστε και στις δύο χειρολαβές ισομερώς. Στήριξη μόνο στο ένα χέρι (και χωρίς συνοδό) μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή τραυματισμό./ When you get out of the walker must rely on both handles equally. Leaning only to one handle (without escort) can cause injury or damage the product.**
- **Να καθαρίζετε τακτικά την τουαλέτα./ Regularly clean the commode chair.**
- **Μην αφήνετε την τουαλέτα βρεγμένη./ Do not let the commode chair wet.**
- **Μην αφήνετε παιδιά κοντά στην τουαλέτα χωρίς επίβλεψη./ Do not let children near the commode chair without supervision**

Εγγύηση/Warranty:

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & όχι βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση/συντήρηση του προϊόντος./ The product has a warranty period of one (1) year. The warranty covers factory defects and not damages from misuse/maintenance product.

MOBIAK A.E
Μ.Μπότσαρη 96-98, Χανιά-Κρήτης

MOBIAK S.A
Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΙ 96-98 Chania-Crete, Greece
+30-28210-63222

www.mobiakcare.gr Email: mobiakcaresales@mobiak.gr

